



## BRUKERMANUAL UNIQUE PIGGEKJELKE



UNIQUE PIGGEKJELKE er utviklet av Enabling Technologies i samarbeid med Sitski Norway AS og EL-MED AS



## Innhold:

- Introduksjon 2
- Brukere og tilpasninger 3
- Utstyr 3
- Spesifikasjoner 4
- Vedlikehold og vaskeanvisning 4
- Garanti 4
- Kontaktinfo 4


## Introduksjon

Gratulerer som eier av Unique piggekjelke for snø og is. Piggekjelken er utviklet av biskiprodusenten i USA; Enabling Technologies i samarbeid med Sitski Norway og EL-MED.

Utøvere som bruker biskien «Bi Unique» i alpinbakken, kan gjøre om hjelpemiddelet til piggekjelke ved å enkelt bytte understell.

Unique dekkre alle brukerstørrelser; fra små barn til voksen. Unique kan pigges med staver, men majoriteten av brukerne vil være mennesker som, i stor grad, er avhengig av hjelp, og trenger mye støtte ift sittestilling og fremdrift. De fleste vil ha nytte av pulkdrag. Kjelken glir lett i skisporene, og fungerer også bra utenfor løypene. Unique er stabil i ulikt terreng; enten ledsager bruker ski eller går på truger. Unique kan også trekkes av hund. Da kan ledsager henge etter i stropper eller stå på et sparkebrett med brems.

FIGUR: Understell Unique med ski

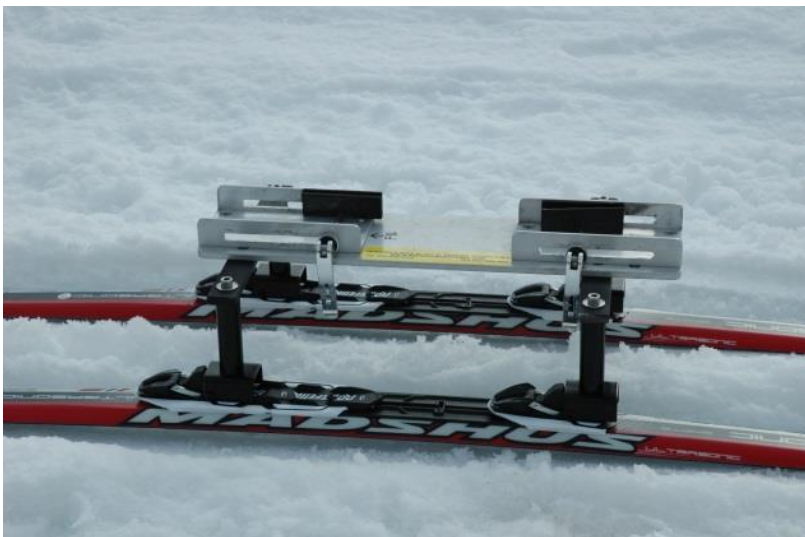

## Brukere og tilpasninger

De fleste aktuelle brukere av Unique piggekjelke vil ha hjelpebehov og trenger en god, stabil sittestilling med god støtte. Typiske brukergrupper vil være CP, muskeldystrofier og multifunksjonshemminger. For mer aktive selvstendige brukere med god styrke og koordinasjon, vil vi anbefale SSN Flexikjelke.

Unique gir en kompakt sittestilling med veldig god støtte. Sitteskallet er fleksibelt med komfortabelt isolerende materiale. Setet har svært varierte og gode stroppemuligheter, og det er lett og tilpasse ulike brukere. Standard stropesett gir muligheter for fotstropp, knestropp, lårstropp, hoftestropp, bryststropp, samt skulderstropper.

## Utstyr

For utøvere som har liten hodekontroll, kan det monteres ulike typer hodestøtter; alt fra enkel støtte som hindrer hodet i å falle bakover til hodestøtter som fikserer hodet mer.

Oftest vil man trenge pulkdrag og støtteski for å utnytte utstyret fullt ut. Pulkdraget leveres med fester og seler for ledsager. Støtteskiene monteres bak på kjelken, og kan reguleres i bredde og høyde.

Uniquen kan også leveres med håndtak for utøver, samt varmeposer i alle størrelser



## Spesifikasjoner:

Produkt	Brukerstørrelse	Vekt	Rammelengde
Unique mini	Under 100	7	70
Unique liten	100-135	9	85
Unique medium	135-155	13	95
Unique stor	155-180	15	105
Unique ekstra stor	180-190	17	115
<b>Aktuelt tilleggsutstyr:</b>			
Varmeposer	Pulkdrag og fester	Håndtak	Støtteski
Sparkebrett	Trekksett hund	Hodestøtte enkel	Hodestøtte fiksert
Stavlengder	Skilengder	Biski understell	

## Vedlikehold og vask

Unique er svært robust og holdbar. Det er viktig at bolter som fester beina på understellet er skikkelig tilskrudd. Vær nøye med at skiene er helt parallelle, og at de passer fint i skisporet. Dersom du går utenfor sporet, må det være kompakt snø eller skare. Uniquen vil ikke egne seg i løs snø. Smale ski har ikke bæreevne nok. Unique er ikke en pulk.

Det er viktig å tørke av kjelken etter bruk. Bruk klut; er det flekker kan du benytte mildt såpevann. Vær nøye med prepp av ski, God glid øker skigleden; det blir lettere å trekke for ledsager.

## Garanti:

Uniquen har garanti i to år for materialtretthet eller feil fra produsentens side. Hvis uvettig bruk, dekkes dette ikke av garantien.



**Lister over tilbehør, reservedeler og HMS nummer legges ut på [www.sitski.no](http://www.sitski.no)**

Sitski Norway AS, Imerslundveien 45, 2323 Ingeberg

Tlf 97111880, mail:[olemorten@sitski.no](mailto:olemorten@sitski.no), [www.sitski.no](http://www.sitski.no)

Orgnummer: 997557409, bankkonto: 18220905787